

AkusTone^{ALERT}

ušní kapky

Návod k použití

Zdravotnický prostředek **AkusTone ALERT** je doporučován v případě zánětů zevního ucha (*Otitis externa*), které se projevují bolestí, svěděním a začerváním v důsledku nesprávné hygieny, přítomnosti zbytků mazu nebo takzvaného plaveckého ucha.

AkusTone ALERT vytváří v zevním zvukovodu podmínky, jež potlačují rozvoj patogenních mikroorganismů, jako jsou bakterie a plísňe, které představují hlavní příčinu zánětů zevního ucha. Dále výrobek obsahuje esenciální oleje: geraniový a čajovníkový, které působí jako přírodní konzervační látky bránící rozvoji mikroorganismů. Obsažený glycerol díky schopnosti hydratovat a vytvořit na povrchu ochrannou vrstvu zmírňuje podráždění a změkčuje mazovou zátku tlačící na stěny zvukovodu, čímž se stane snadněji odstranitelnou. **AkusTone ALERT** lze používat také jako prevenci u osob trpících na opětovné záněty zevního zvukovodu spojené s častým nebo delším pobytem ve vodě (takzvané plavecké ucho).

AkusTone ALERT:

- je doporučován v případě zánětlivých onemocnění zevního ucha (*Otitis externa*), které se projevují:
 - bolestí,
 - svěděním,
 - začerváním;
- vytváří podmínky, které potlačují rozvoj patogenních mikroorganismů,

- hydratuje a zklidňuje podráždění,
- je vhodný jako prevence u osob trpících na takzvané plavecké ucho.

Návod k použití:

Výrobek je určen pro aplikaci do zevního zvukovodu u dospělých a dětí starších 3 let. Dávkování v případě zánětu zevního ucha, pokud ošetřující lékař neurčí jinak: 1–2 kapky 3–4 krát denně.

Dávkování při prevenci infekcí zevního zvukovodu (takzvaného plaveckého ucha): 1–2 kapky po plavání v bazénu.

Kapátko (špičku aplikátoru) nevšunujte hluboko do ucha, abyste nepoškodili sluchové orgány.

Složení: čištěná voda, glycerol, polysorbát 80, olej z čajovníku (tea tree), cetylpyridiniumchlorid, kyselina octová, olej z pelargonie (geranium), octan sodný.

Zvláštní upozornění a doporučená opatření:

Nepoužívejte v případě alergie na jakoukoli složku výrobku. Nepoužívejte v případě prasklého ušního bubínku, otevřených ran, přítomnosti cizího předmětu v uchu, nebo pokud užíváte jiný prostředek působící lokálně v uchu. Nepoužívejte do očí, nosu ani úst. Nekapejte do uší, když máte nasazené naslouchátko. Aplikujte výrobek do uší alespoň hodinu předtím, než vsunete naslouchátko.

Pocítíte-li silnou bolest v uchu, vyhledejte lékařskou pomoc. Děti pociťující v uchu bolest má vždy ošetřit lékař. Produkt je určen ke krátkodobému používání. Pokud se stav pacienta nezlepší nebo se dokonce zhorší po 2 dnech používání kapek, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se objeví další příznaky, jako je horečka, ušní výtok nebo podezření na přítomnost cizího předmětu ve zvukovodu, obraťte se na svého lékaře.


Aplikace zdravotnického prostředku:



1. Před použitím důkladně protřeptejte.



2. Nakloňte hlavu nebo si lehněte na bok tak, aby ucho směřovalo vzhůru, a jemně odtáhněte ušní lalůček (spodní část ušního boltce) směrem od krku.

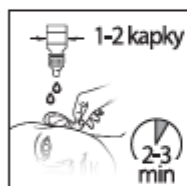

3. Stisknutím nádoby naka-
pejte 1–2 kapky do zvukovo-
du a zůstaňte ve stejné pozici
po dobu 2–3 minut. Z hygie-
nických důvodů se snažte
během aplikace kapátkem
nedotýkat ucha.




4. Jakmile se zvednete, vy-
teče nadbytečný roztok z ucha
ven. Setřete jej čistým kapes-
níkem.



5. Po použití nádobku pevně uzavřete.

Podmínky uchování:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte dobře uzavřené v původním obalu. Dbejte na dodržování správných podmínek uchování produktu. Nepoužívejte produkt po uplynutí data použitelnosti.

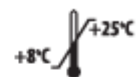

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice

Distributor: Aflofarm Czech Republic s.r.o.
Vinohradská 33/89, 120 00 Praha-Vinohrady
Česká republika, office@aflofarm.cz

Datum poslední revize textu: 02/2021

Symbole označení na obalu:




číslo šarže



datum použitelnosti



čtěte návod k použití

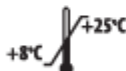

teplotní limit pro uchování



výrobce

CE